



Pruebas de la Alergia para Perros


Instrucciones para Recoger la Muestra

Saque el dispositivo y el tubito del paquete. Por favor, siga estos 6 sencillos pasos:


- 1 Saque el tubito (c) donde almacenará el líquido y téngalo a mano.



- 2 Separe el mango azul (a) de la jeringa de plástico (b) y téngalo (b) a mano.

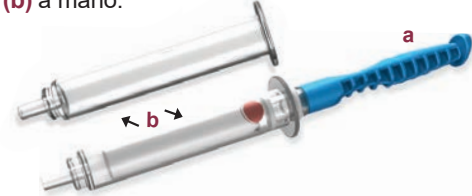

- 3 Coja el dispositivo por la parte azul (a) sin la jeringa de plástico (b) con el algodón al descubierto.

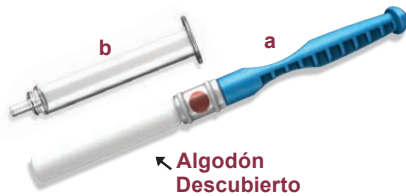

- 4 Coloque el dispositivo por la parte del algodón en la boca de su mascota para empaparlo. Esta suele producirse debajo de la lengua, a los lados o en la parte interna de las mejillas.



- 5 Recoja el líquido de la boca del perro hasta que aparezca la señal roja. Puede tardar en aparecer desde los 15 segundos hasta un par de minutos, según la cantidad de líquido.




- 6 Tape el algodón con la jeringa de plástico (b). Coloque la punta de la jeringa (b) detro del tubito (c). Las dos piezas deben encajar. Una vez encajadas, presione firmemente para extraer el líquido dentro de (c). Si el líquido se ha secado, puede añadir unas gotas de agua. Esto solo debería ocurrir si tiene el kit durante varias semanas.



ÚLTIMO PASO: ¡Lo has conseguido!

Cuando haya terminado, se puede deshacer de (a) y de (b). Asegúrese de que (c), que contiene el líquido de la boca de tu perro, está bien cerrado e insértelo en el pequeño sobre de retorno y envíenoslo para su análisis.

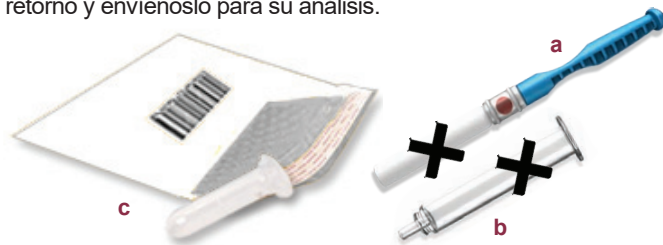

UN PAR DE NOTAS:

- Puede intentar conseguir el líquido en varias ocasiones. No tiene por qué ser a la primera.
- Puede sostener un premio delante de su perro para estimularlo y obtener más líquido.

CONSEJOS EXTRA:

Por favor, envíe su muestra en un máximo de 24h de haberla tomado. Se recomienda que las muestras sean recogidas y enviadas a principios de semana para evitar que queden en el correo durante el fin de semana. Una vez tomadas, las muestras tienen una vida de aproximadamente 10 días.

